



Dental do Protético

Tutorial

E-max Cervical

A cervical transpa, com fluorescência ligeiramente alta, são utilizados para completar a estratificação do terço cervical.



Aumentar o efeito em profundidade cervical:



Material IPS e-max Ceram Cervical Transpa



Incisal Edge

Instruções de Queima E-max Ceram

	Vácuo	Temperatura Inicial	Tempo	Aquecimento de temperatura	temperatura de manutenção	Tempo	Conexão Vácuo	Desconexão Vácuo
Dentina, Incisal, Transparente, Margem, Cervical, Mamelon	Com Vácuo	403°C	4min	50°C	750°C	1min	450°C	749°C