



Dental do Protético

Tutorial

EX-3 CERVICAL



Aplicação da cervical

Combine as cores misturando dentina e cervical para obter a cor desejada da cervical. Aplique a mistura no terço cervical e proximal. Após condensação adequada, coloque a coroa no modelo. Nos casos em que a cervical não for utilizada, aplique dentina da mesma forma.

Tabela de Combinação de Cores

	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaco em Pasta	PO A1	PO A2	PO A3	PO A3,5	PO A4	PO B1	PO B2	PO B3	PO B4	PO C1	PO C2	PO C3	PO C4	PO D2	PO D3	PO D4
Margem	M A1	M A2	M A3	M A3,5	M A4	M B1	M B2	M B3	M B4	M C1	M C2	M C3	M C4	M D2	M D3	M D4
Dentina Opaca	OB A1	OB A2	OB A3	OB A3,5	OB A4	OB B1	OB B2	OB B3	OB B4	OB C1	OB C2	OB C3	OB C4	OB D2	OB D2	OB D4
Dentina	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Cervical	-	A2 + CV1 (2+1)	A3 + CV1 (1+1)	A3,5 + CV1 (1+1)	Cv 1	-	B2 + CV2 (2+1)	B3 + CV2 (1+1)	CV2	-	C2 + CV3 (2+1)	A3 + CV3 (1+1)	CV3	D2 + CV4 (2+1)	D3 + CV4 (1+1)	CV 4
Incisal	E2	E2	E3	E3	E3	E1	E2	E3	E3	E2	E3	E3	E3	E2	E3	E3
Opalescente	LT1(T1)															