



# Dental do Protético

Tutorial

## Inline Incisal



Durante a aplicação da dentina, coloque também uma camada de esmalte exterior utilizando os materiais Incisal ou Transpa Incisal. Se necessário, ciclos adicionais de queima de correção podem ser realizados utilizando os mesmos parâmetros de queima.

### Tabela de Queima InLine

	Temperatura Inicial	Aquecimento de Secagem	Velocidade de Aquecimento	Temperatura Final	Tempo de Manutenção
1½ <sup>2</sup> Queima de Opaco Pasta	450°C	6min	100°C	929°	2min
1½ <sup>2</sup> Queima de Margem	450°C	4min	60°	929°	1min
1ª Queima Dentina, Incisal e Gengiva	450°C	1 min	60°C	909°C	1 min
2ª Queima Dentina, Incisal e Gengiva	450°C	1 min	60°C	899°C	1 min
Add-on Dentina e Incisal	450°C	1 min	60°C	859°C	1 min