



# Dental do Protético

Tutorial

## Inline Margem



A cerâmica de ombro deve ser aplicada sobre uma estrutura de metal após a queima do metal, se for necessário um espaço maior, faça isso durante a finalização. Antes de aplicar a margem, isole o gesso e aguarde a secagem e aplique a margem.

Depois de selecionada a cor desejada, aplique a margem de

forma volumosa na cervical, deixando a superfície com um formato convexo e deixe secar. Na sequência, retire a estrutura metálica de forma cuidadosa e remova o excesso de margem aplicada sobre o gesso.

Após a queima da cerâmica de ombro, faça pequenos ajustes com pedras e borrachas. Para um melhor resultado faça uma segunda queima de margem, usando as mesmas cores utilizadas na primeira queima. Contudo, não se esqueça de isolar o gesso novamente e corrija cuidadosamente as áreas perdidas inserindo a porcelana de ombro nos espaços criados após a primeira queima devido a contração. Finalmente remova a estrutura metálica cuidadosamente do modelo de gesso e leve para a segunda queima.

## Tabela de Queima Inline

	Temperatura Inicial	Aquecimento de Secagem	Velocidade de Aquecimento	Temperatura Final	Tempo de Manutenção
1 <sup>o</sup> /2 <sup>o</sup> Queima de Opaco Pasta	450°C	6min	100°C	929°	2min
1 <sup>o</sup> /2 <sup>o</sup> Queima de Margem	450°C	4min	60°	929°	1min
1 <sup>o</sup> Queima Dentina, Incisal e Gengiva	450°C	1 min	60°C	909°C	1 min
2 <sup>o</sup> Queima Dentina, Incisal e Gengiva	450°C	1 min	60°C	899°C	1 min
Add-on Dentina e Incisal	450°C	1 min	60°C	859°C	1 min