



Dental do Protético

Tutorial

Inline Opaco Pasta



1º - Selecione o Opaco Pasta correspondente a cor desejada. Se necessário, homogenize o opaco pasta agitando antes de pegar na seringa. Retire somente a quantidade desejada e se for necessário dilua-o com líquido de opaco pasta. Aplique primeiramente uma fina camada sobre a superfície do metal e faça a

queima.

2º - Aplique a segunda camada de opaco pasta sobre a primeira. Após a queima, a cobertura de opaco deverá ter uma característica sedosa e brilhante. O condicionamento da superfície do metal deverá ser inteiramente coberta com o opaco.

Tabela de Queima Inline

	Temperatura Inicial	Aquecimento de Secagem	Velocidade de Aquecimento	Temperatura Final	Tempo de Manutenção
1½º Queima de Opaco Pasta	450°C	6min	100°C	929°	2min
1½º Queima de Margem	450°C	4min	60°	929°	1min
1º Queima Dentina, Incisal e Gengiva	450°C	1 min	60°C	909°C	1 min
2º Queima Dentina, Incisal e Gengiva	450°C	1 min	60°C	899°C	1 min
Add-on Dentina e Incisal	450°C	1 min	60°C	859°C	1 min